


骨盤臓器脱用ペッサリー

# Milex ペッサリー

身体に優しいシリコン素材です。  
汎用性のある5種類と豊富なサイズを揃えました。

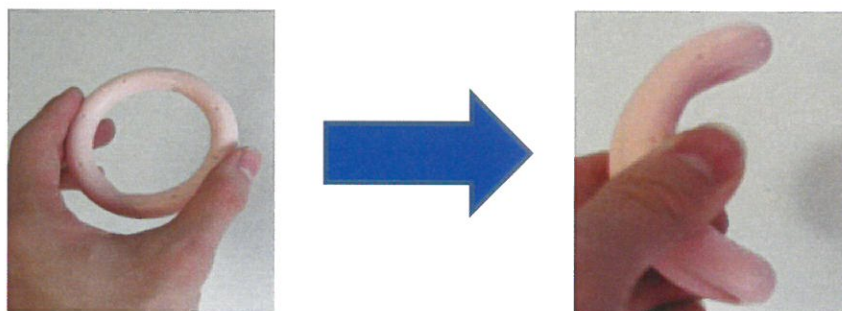


基本となるリングタイプ(3種類)は簡単に折り曲げられますので、自己着脱が容易です。

Milex ペッサリーは、毒性のない医療用シリコン製で、生体適合性に最も優れた、安全な素材でできています。シリコンは、臭いや分泌物を吸収せず、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、定期的に滅菌し、清潔にすることができます。


## Milex ペッサリー

Milex ペッサリーには5種類のユニークなタイプを取り揃えてあります。またサイズも豊富です。リングタイプ、サポートリングタイプ、ノブ付きリングタイプは軽度(1度及び2度の骨盤臓器脱)な場合に最適で、かつノブ付きは腹圧性尿失禁の予防にも効果があります。少し進んだケース(2度及び3度の骨盤臓器脱)やリングタイプがうまくフィットしない場合には、ドーナツタイプやゲルホーンタイプが適しています。いずれも医師もしくは医師の指示を受けた医療従事者の指導により身体にフィットしたタイプ・サイズをお選びください。


ノブ付きリング

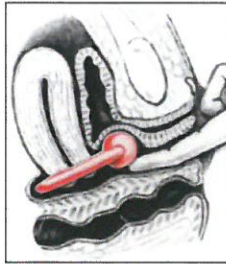

ドーナツ

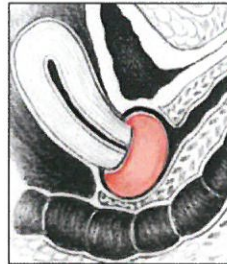

ゲルホーン

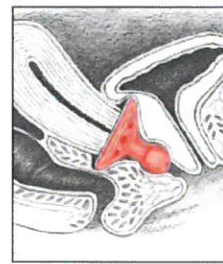

### 【使用上の注意】

- 本製品は、使用前に滅菌水にて十分洗浄し、乾燥させてから使用してください。
- 本製品の使用は、医師もしくは医師の指示を受けた医療従事者の指導の下に行ってください。
- 本製品のサイズは、医師もしくは医師の指示を受けた医療従事者の指導により適切なサイズを判定してください。
- 膣内に炎症や出血、感染がある場合は使用しないでください。
- 本製品を取り外した後は、必ず出血や感染がないかを観察し、必要に応じて医師の診察を受けてください。

### ■ Milex ペッサリー (カタログ番号・形状)



サイズ	外径(mm)	リング	ノブ付きリング	サポートリング	サイズ	外径(mm)	ドーナツ	サイズ	外径(mm)	ゲルホーン
00	44	MXPER00	MXPERK00	MXPRS00	00	51	MXPDO00	00	38	MXPGE00
01	51	MXPER01	MXPERK01	MXPRS01	01	57	MXPDO01	01	44	MXPGE01
02	57	MXPER02	MXPERK02	MXPRS02	02	64	MXPDO02	02	51	MXPGE02
03	64	MXPER03	MXPERK03	MXPRS03	03	70	MXPDO03	03	57	MXPGE03
04	70	MXPER04	MXPERK04	MXPRS04	04	76	MXPDO04	04	64	MXPGE04
05	76	MXPER05	MXPERK05	MXPRS05	05	83	MXPDO05	05	70	MXPGE05
06	83	MXPER06	MXPERK06	MXPRS06	06	89	MXPDO06	06	76	MXPGE06
07	89	MXPER07	MXPERK07	MXPRS07	07	95	MXPDO07	07	83	MXPGE07
08	95	MXPER08	MXPERK08	MXPRS08	外径はリング部の外径(mm)			08	89	MXPGE08
09	102	MXPER09	MXPERK09	MXPRS09				09	95	MXPGE09
10	108	MXPER10	MXPERK10	MXPRS10						

製造元: クーパーサージカル社(米国)

一般的名称: 避妊用ペッサリー(35237000)

医療機器認証番号: 226AIBZX00058000

製造販売元:

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0004  
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F  
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380  
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店:

**MTF** 株式会社 **メディカル・タスクフォース**

本社 〒550-0006 大阪市西区江之子島 1-7-3 奥内阿波座駅前ビル 702  
TEL : 06-6446-2100 FAX : 06-6446-2105  
URL : <http://www.medical-taskforce.com>  
本カタログの製品仕様は改良等により予告なしに変更することがあります。

2016.12 Rev01