


# 着用のポイント

※イラストでは省略していますが、ショーツの上から着用してください。

## ★ おなか側

白いネームタグが隠れる  
ように持ち上げる

W字部はおなかの  
ふくらみの下ではく

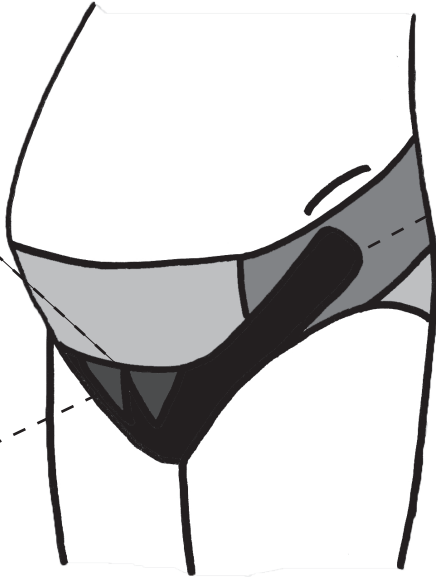



左右には強く引っばらず、  
ずり落ちない程度に留める

※引っばりすぎると製品が  
傷んだり、面ファスナーが  
外れやすくなるので注意！

## ★ おしり側

Y字のストラップが  
ピンと張って  
肛門部が支えられている  
感覚を確認する

できるだけ深くはく

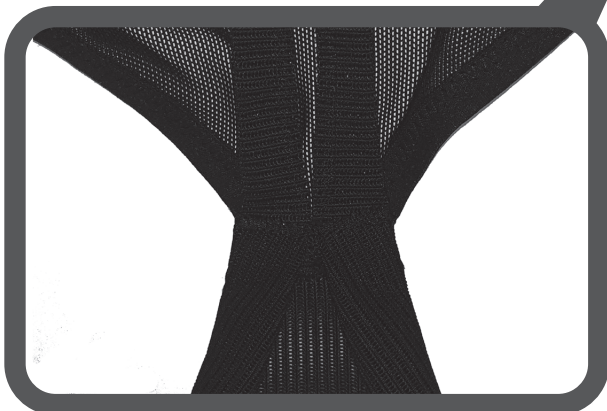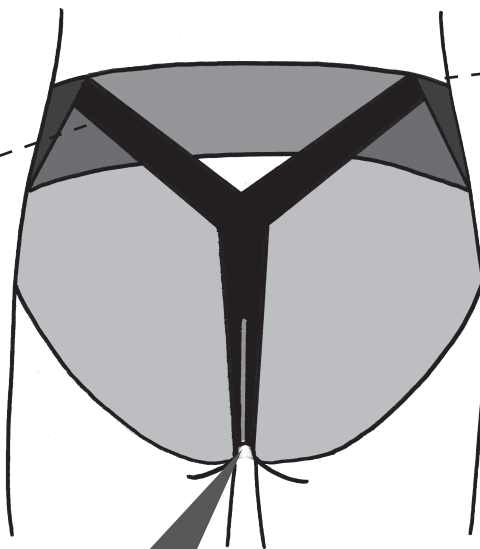

ストラップと着脱部の継ぎ目が、  
ちょうど肛門あたりにくるように  
してはくのがコツ！