

「面ファスナー延長部品」の使い方

- ・延長部品により、留める部分が約5 cm伸びます。
- ・洗濯時は、面ファスナー部分で生地を傷めない様、取り外して洗ってください。
- ・サポーター本体を買い替えた時も、付け替えて引き続きご使用いただけます。
- ・面ファスナーに糸くず等が溜まると、付きが悪くなります。時々粘着テープ等で取り除いてください。

1、右図の様に
骨盤底サポーターの面フ
ァスナーを、延長部品の
「角カン」に通します。



2、(洗濯時と同様に)
面ファスナーを折り曲げ
てしっかり押さえて留め
ます。



ご不明な点は電話にてお問い合わせください。 03-3940-5502 : アダム医健