

着用のポイント


※イラストでは省略していますが、ショーツの上から着用してください。

★おなか側

着脱部中央を真上に
引き上げるよう意識
(身体から浮かない
ように)

※座ったときに痛い場合
は緩める

W字部はおなかの
ふくらみの下


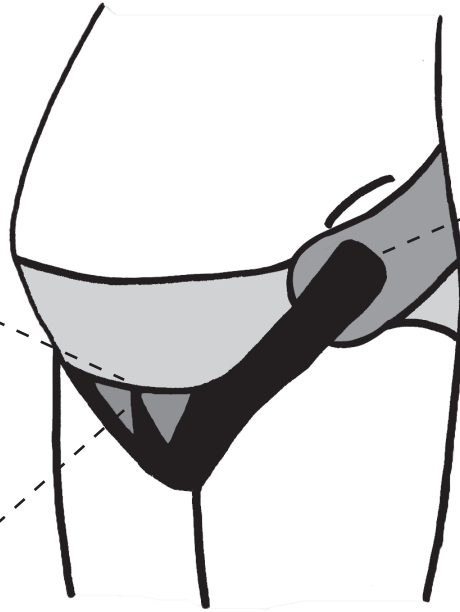


左右には
強く引っ張らず、
ずり落ちない
程度に留める
※引っぱりすぎると
製品が傷んだり、
面ファスナーが
外れやすくなるので
注意!

★おしり側

背中側はできるだけ
深くはく

Y字のストラップが
ピンと張って
肛門部が支えられている
感覚を確認
(ストラップをおしりに
くいこませる)

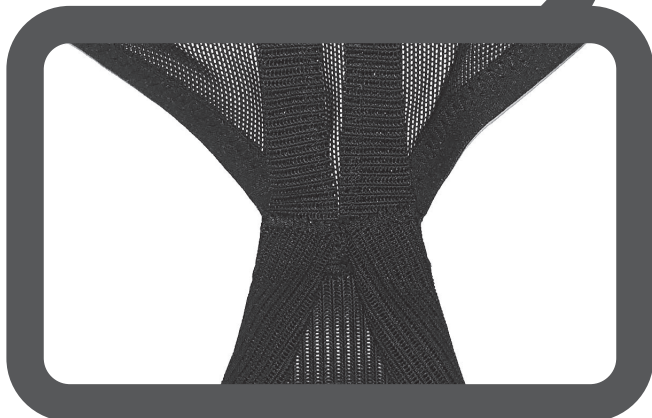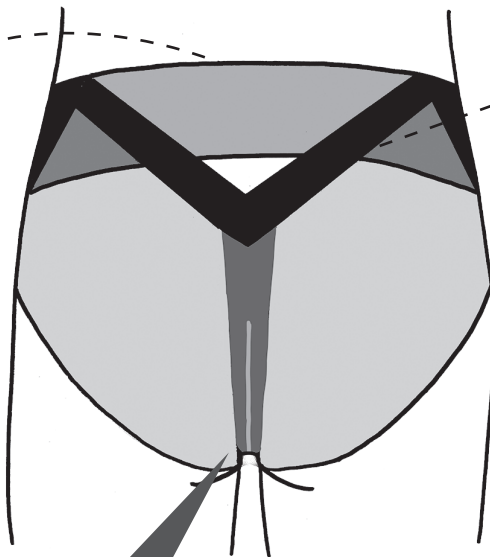

ストラップと着脱部の継ぎ目が、
ちょうど肛門あたりにくる
ようにしてはくのがコツ!