

2分で3種の測定に

# POP-Q 腔鏡



- 透明樹脂で計測目盛り付き
- オートクレーブ対応で再使用可能(ディスポではありません)
- POP-Q、Q-TIP、会陰を片手でワンステップ計測


品目番号:27B3X0011400003

一般医療機器

不二ヘルスケア事業部

# POP-Q 膣鏡 取り扱い説明

## POP-Qによる子宮脱の評価—測定部位—

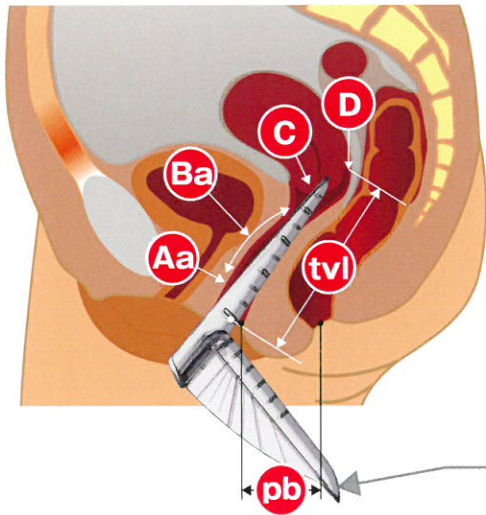

**Aa :**  
外尿道口から  
3cm近位の前  
膣壁中央部  
-3cm to + 3cm

**Ba :**  
Aa~C間の部分で  
最も突出した部分  
-3cm to + tvl

**C :**  
子宮頸部  
-10cm to  
+10cm

**pb :**  
後方処女膜正中から  
肛門中心部までの  
長さ

**tvl :**  
全室長


**D :**  
後膣円蓋部  
(膣尖部)

Aa,Ba,C,pb,tvl,D測定時の  
デバイス挿入方向


**gh :**  
外尿道口中心から  
後方処女膜正中部  
までの長さ

**Ap :**  
処女膜癒痕から  
3cm近位の後膣壁  
-3cm to + 3cm

**Bp :**  
Ap~C間の部分で  
最も突出した部位  
-3cm to + tvl

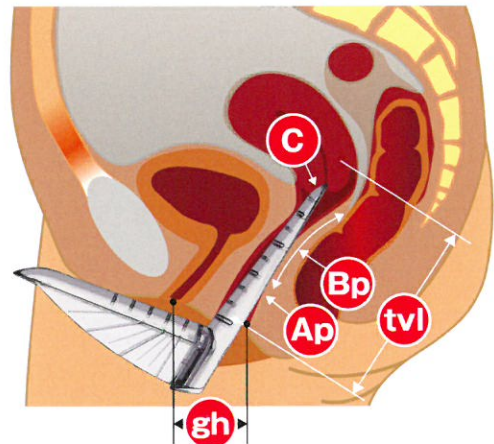

gh,Ap,Bp測定時の  
デバイス挿入方向

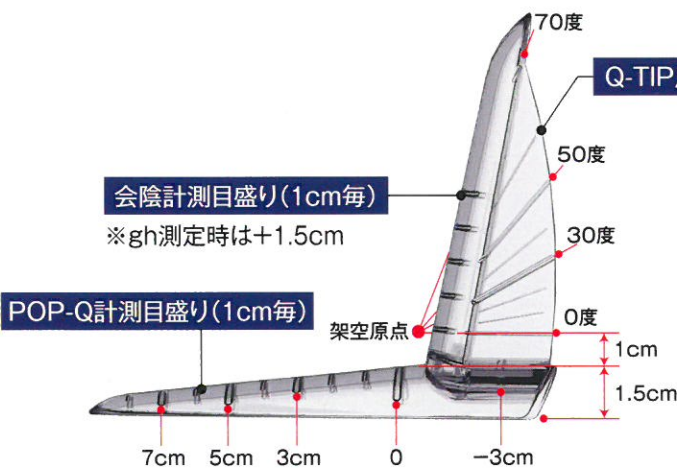

滅菌条件	
温度	時間
115℃~118℃	30分以上
121℃~124℃	15分以上
126℃~129℃ (135℃まで可)	10分以上

滅菌する場合は、日本薬局方参考情報 11.微生物滅菌法  
2.滅菌法 2-1.加熱法による条件を準用してください。

監修／大阪市立大学医学研究科 女性生涯医学 古山将康教授

製造販売元 不二ヘルスケア事業部

〒544-0014 大阪市生野区巽東4丁目4-37  
TEL.06-4306-6824 FAX.06-4306-6829  
E-mail : hc@fujiseiki.com

販売店

**MTF** 株式会社 メディカル・タスクフォース

本社 〒550-0006 大阪市西区江之子島1-7-3奥内阿波座駅前ビル702  
TEL : 06-6446-2100(代表) FAX:06-6446-2105  
URL : www.medical-taskforce.com  
e-mail : info@medical-taskforce.com