

2分で3種の測定に

# POP-Q 腔鏡



- 透明樹脂で計測目盛り付き
- オートクレーブ対応で再使用可能(ディスポではありません)
- POP-Q、Q-TIP、会陰を片手でワンステップ計測


品目番号:27B3X00114000003

一般医療機器

不二ヘルスケア商品部

# POP-Q 膣鏡 取り扱い説明

## POP-Qによる子宮脱の評価—測定部位—

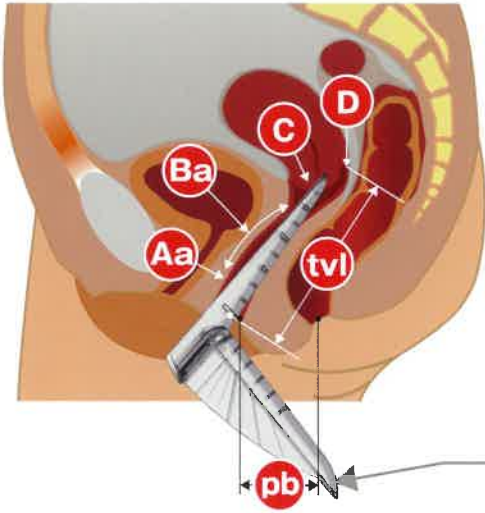

### Aa :

外尿道口から  
3cm近位の前  
膣壁中央部  
-3cm to + 3cm

### Ba :

Aa~C間の部分で  
最も突出した部分  
-3cm to + tvl

### C :

子宮頸部  
-10cm to  
+10cm

### pb :

後方処女膜正中から  
肛門中心部までの  
長さ

### tvl :

全膣長

### D :

後膣円蓋部  
(膣尖部)

Aa,Ba,C,pb,tvl,D測定時の  
デバイス挿入方向

### gh :


外尿道口中心から  
後方処女膜正中中  
部までの長さ

### Ap :


処女膜癒痕から  
3cm近位の後膣壁  
-3cm to + 3cm

### Bp :

Ap~C間の部分で  
最も突出した部位  
-3cm to + tvl

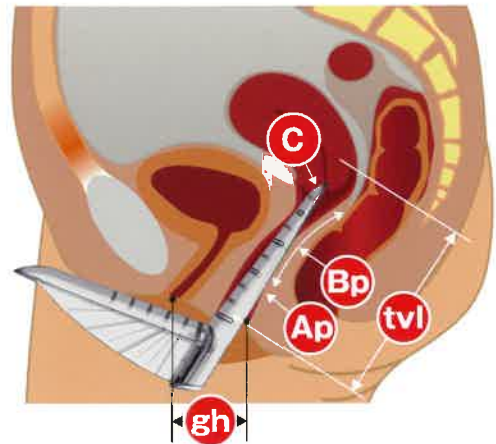

gh,Ap,Bp測定時の  
デバイス挿入方向

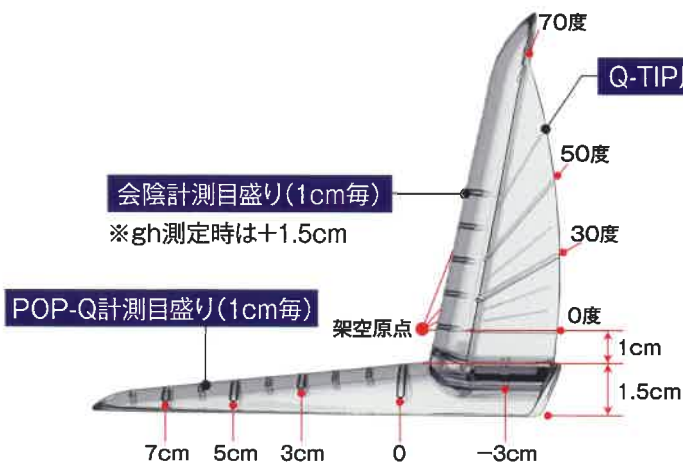

### 滅菌条件

温度	時間
115°C~118°C	30分以上
121°C~124°C	15分以上
126°C~129°C (135°Cまで可)	10分以上

滅菌する場合は、日本薬局方参考情報 11.微生物滅菌法  
2.滅菌法 2-1.加熱法による条件を準用してください。

監修／大阪市立大学医学研究科 女性生涯医学 古山将康教授

製造販売元 不二ヘルスケア商品部  
〒541-0048 大阪市中央区瓦町 4-8-4  
井門瓦町第2ビル  
TEL 06-7166-6824 FAX 06-7166-6827  
e-mail hc@fujiseiki.com

販売店

**MTF** 株式会社 メディカル・タスクフォース

本社 〒550-0006 大阪市西区江之子島1-7-3奥内阿波座駅前ビル702  
TEL : 06-6446-2100(代表) FAX:06-6446-2105  
URL : www.medical-taskforce.com  
e-mail : info@medical-taskforce.com