


## ◆ 布カバーの付け方


5 布カバーをサポートの前面丸穴の上のフックに取り付けます。椅子に腰かけると、装着が楽に行えます。

6 布カバー後ろの丸い穴より尿袋を布カバー内に引き込みます。布カバー装着後、の尿袋出し入れは、全面ファスナー口より行います。

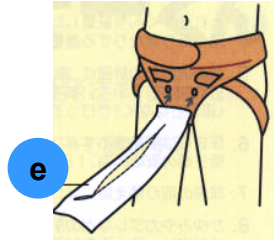


**ポイント!** 前面のファスナーを開き、尿袋がねじれたり折れまがったりしないように、まっすぐ布カバーの先端まで導きます。

7 **f** 尿袋の先端の尿捨て口から空気を出して、尿袋の先端を2~3回折り曲げて、クリップで留めます。

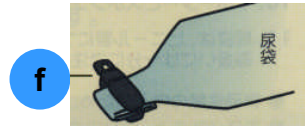

**ポイント!** クリップは、挟み口と逆側の上板を上を起こすと口が開きます。締める時は、カチッと音がするまで倒しこんで元の状態に戻します。

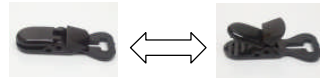

## ◆ 尿の捨て方

8 布カバーのファスナー口より、尿が溜まった尿袋を引き出します。

**ポイント!** 尿の重みがフィットスポンジに加わらないように扱います。

9 尿袋先のクリップをはずし、トイレに流します。その後、再び尿捨て口から空気を出し先端を折り畳んでクリップで留めます。



**注意!**

クリップを外す時は、尿捨て口を上に向けて指でしっかりとつまみ、尿がこぼれないように注意してください。

※ 衛生上、尿排出後の尿捨て口はトイレトペーパー・ティッシュペーパーで尿のしずくを拭き取ってからたたむ事をおすすめします。



ご使用前に必ずこの取扱説明書を読んでから装着してください。

## 尿袋 とれぞーくん 取扱説明書

1. 陰茎の根元までしっかりと装着して下さい。中途半端な位置への装着は脱落の原因となります。※キチンと装着できているか確認の上でご使用下さい。※サポーターは装着したままで排便が可能です。
2. 夜間寝返りをされる方や激しい動きが予想される場合は、使用しないでください。
3. 陰茎と陰囊部分の毛が多いと装着しづらく、尿がしみ出る原因となります。陰毛が多い場合は、短く刈るか除毛クリームなどで処理してお使い下さい。
4. とれぞーくんを装着したあとは、尿袋の入った布カバーを太ももの内側に収めて、座ったり寝たりする際は尿袋がもやおしりの下に回り込まないようにご注意ください。
5. 装着後最初の排尿は、陰茎がスポンジから抜け出ていない事、布カバー内の尿袋が折れ曲がっていない事を確認の上、尿袋に流れ込みやすいように立ち上がった姿勢(座位ではなく)で行ってください。冬期着用の際はズボン下の中に入れてください。逆流する場合があります。
6. 尿袋には尿を溜め過ぎないで、適宜排出してください。衛生面の安心の為、1日1個で取り換えてご使用になる事をおすすめします。
7. 尿袋の取り替え時には、陰茎と陰囊の皮膚を洗って清潔にして下さい。
8. かゆみやカブレなどの肌の異常が認められた場合は、肌を清潔にしてご使用を休止してください。休止後も状態が改善されない場合は皮膚科専門医に御相談ください。
9. すべての器具は、清潔にして使用ください。2セットご準備の上、サポーターやカバー・スポンジ等の付属品の洗濯交換をしてご使用になる事をおすすめします。
10. サポーターとスポンジへの薬品処理・熱処理は行わないでください。
11. 尿袋は、ポリエチレン製につき尖った物や鋭利な物で破れる恐れがあります。取扱には十分にご注意ください。

- 製品性能の向上のため、製品の一部または全部を予告なしに変更する場合があります。
- 夜間寝返りができない方にご使用ください。
- 製品の特性上、開封後の返品はお受けできません。ご了承ください。

製造・販売



らくらくサポート 関山美保子

〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸3260

TEL 044-911-4277 fax 044-900-2987

## ◆尿袋 とれぞーくん 基本セット

- a サポーター 1枚  
材質:ウレタン、ナイロン、ポリエステル
- b 尿袋+肌保護シート 15包/箱
  - b-1 肌保護シート  
材質:パルプレーヨン(トイレには流さないでください。)
  - b-2 尿袋  
材質:リング部:紙  
袋部:ポリエチレン
- c フィットスポンジ 1個  
材質:ポリウレタンフォーム
- d キャップ 1個  
材質:ABS樹脂
- e 布カバー 1枚  
材質:不織布
- f クリップ 1個  
材質:ABS樹脂



## ◆尿袋 とれぞーくん 規格

記号	品名	サイズ
a	サポーター	腰ベルト:W50×1950mm 前あて部:W220×H200mm 太ももベルト:W27×L480mm
b-1	肌保護シート	W100×H130mm
b-2	尿袋	外袋:W94×L595mm 中袋:W94×L160mm
c	フィットスポンジ	φ56×H26mm
d	キャップ	φ62×H22mm
e	布カバー	W100×L150mm
f	クリップ	W20×L40×H8

## ◆尿袋の付け方

サポーターの穴がある方を前側に、腰ベルトだけを巻いて仮に付けておきます。

1

椅子に腰かけると、装着がラクに行えます。パンツは前がゆったりと開けるタイプ、または、陰茎を取りだす穴をあけたものを着用します。

ポイント!

陰茎に **b-1** 肌保護シート※→ **b-2** 尿袋の順で差入れます。

※肌保護シートは、不織布製で肌に心地よく、陰毛や陰部の皮膚を用具に挟む事を防ぎます。(水洗トイレには流さないでください)

2

尿袋のペーパーリング部から息を吹き込んで尿袋全体を1度膨らませると、陰茎の根元までかぶせやすくなります。尿袋の上から陰茎の先端をつまんで、引き込みます。

ポイント!

注意!

尿袋は、息を吹き込んだ際に空気漏れを確認してください。空気漏れが認められた尿袋は、使用せず破棄してください。

3

フィットスポンジの切り目を開いて、尿袋の上から **陰茎の根元を巻くように** 固定します。

ポイント!

陰茎の先がスポンジから尿袋側に飛び出していることを確認してください。尿袋は縮めた状態にならないように、袋の先を引張りながら伸ばした状態でスポンジを装着します。

4

尿袋の先から通した **d** キャップに **c** フィットスポンジを押し込んで固定します。

- ◎ サポーターの丸穴に内側より尿袋を通し、キャップのツバが丸穴に当たるまでしっかりと押し込み、具合を見ながらサポーターの腰ベルトを改めて締め込みます。  
2本の太ももベルトは、太ももの後ろ側に回してサポーターのベルト通し穴に裏側より差入れて全面マジックテープで留めます。

ポイント!

サポーターの表面はどこの位置でも、マジックテープが貼付きます。締め過ぎず、ベルトが緩まない程度に調整しながら、安定した位置にしっかりと留めます。

装着イメージ

