

<着用のポイント>

履き方で、お問い合わせが多い内容を記載します。

- 1、腰ベルトは、後ろは深く、前は浅く履きます。
おなかが出ている方は、ネット部をおへそより下にします...
着脱部(前のW字部分)は、左右に引過ぎない様ご注意ください
- 2、後ろのY字ストラップがピンと張る様、内側に親指を入れて軽く前にしごき、緩みを腹側に集めて取ってください。

着用のポイント

※イラストでは省略していますが、ショーツの上から着用してください。

★ おなか側

白いネームタグが隠れる
ように持ち上げる


W字部はおなかの
ふくらみの下ではく



ずり落ちない程度に留める
(きつく締め付ける必要は
ありません)

★ おしり側

Y字のストラップが
ピンと張って
肛門部が支えられている
感覚を確認する

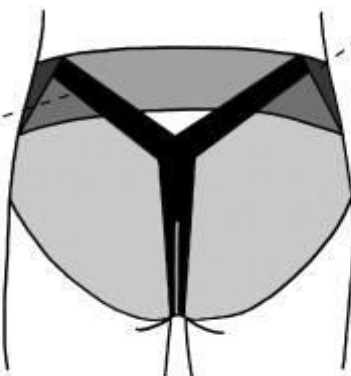

できる限り深くはく