


骨盤底サポーター

【警告】


- 使用方法 1、本品は着用している間の症状を緩和するものです。治療には医師への相談及び骨盤底筋体操が必要です。
- 2、就寝時は着用しないでください。就寝時の着用は体表面のリンパの流れを悪くし、体に悪影響を与えます。

【形状・構造及び原理等】

- ① 股間部：布の張力により骨盤底を持ち上げて陰を閉じ、下垂した臓器を元の位置に保ちます。
- ② 着脱部：持ち上げる力を腰ベルト部へ伝え固定します。
- ③ 腰ベルト部：伝わった力を腰回りの摩擦力で支えます。

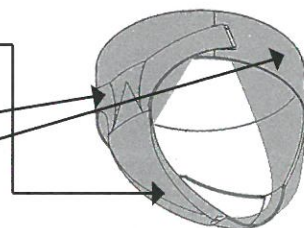

通気性の良いメッシュ素材（ナイロン・ポリウレタン）で構成され、
 腰囲（右図：寝た姿勢で、腰骨の前出っ張り部分で測った骨盤の周長）
 後股上（右図：骨盤上端（標準的なショーツのゴムライン）から
 肛門までの長さ）

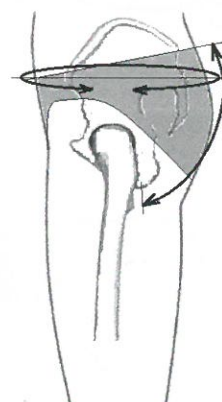

により、下表の各サイズがあります。

適用範囲		腰囲 (cm)		
		75～85	85～95	95～105
後股上 (cm)	24 以上	80N	90N	100N
	24 未満	80K	90K	-

【使用目的】 骨盤臓器脱の症状を有する患者が、下着の上に重ねて履くことにより、下垂した臓器を正常な位置に保持する。

【使用方法等】

下着の上に重ねて履き、着脱部を引き上げて左右の面ファスナー（マジックテープ）で留めて用いる。

イラスト付き説明書を必ず読んでご使用ください。

【使用上の注意】

- 1、腰痛を生じた際は着用を中断し、良くなってから着用してください。
- 2、洗濯時は面ファスナーを留め、手洗いし、タオル等で水気をきって陰干しして下さい。
 脱水機・高温・紫外線はゴム部の寿命を縮めます。

【保管方法及び有効期間等】

- 1、保管方法：直射日光を避け室内で保管してください。
- 2、耐用期間：ゴムが伸びてしまうと製品寿命ですので買い替えが必要です。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】



製造販売業者
合同会社アダム医健
 Tel:03-3940-5502