

## サイズの測定方法


骨盤底サポーターが効果を発揮するためには、患者様に合う適切なサイズの測定と選定が必要です。サイズが大きすぎると、十分な挙上効果が得られません。

腰囲……骨盤の前腸骨棘の高さで測った骨盤周囲長

※立位ではきつめにメジャーを巻いて測ってください。

後股上…背部骨盤上端（標準的なショーツのゴムライン）から肛門までの長さ

※背中脂肪が厚く、骨盤上端の位置が分かりにくい場合は、附近の脂肪層のくぼみの位置から肛門までの長さを測ってください。

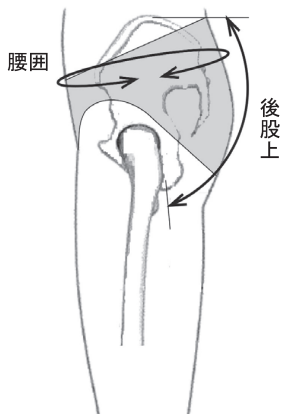

適用範囲		腰囲 (cm)		
		75～85	85～95	95～105
後股上 (cm)	24 以上	80N	90N	100N
	24 未満	80K	90K	-

90N が平均サイズです（およそ 50% の患者様が該当）。

## 使用上の注意

1. 就寝時は着用しないよう御指導ください。
2. 直射日光を避け室内で保管してください。
3. 洗濯時は手洗い・陰干しをしてください。
4. ゴムが伸びてしまうと製品寿命ですので買い替えが必要です。

日本製

製造販売業者  
合同会社アダム医健  
東京都豊島区西巢鴨 1-34-9  
Tel: 03-3940-5502  
E-mail: info@adam-med.co.jp

販売代理店  
**MTF** 株式会社メディカル・タスクフォース  
本社 〒550-0006  
大阪市西区江之子島 1-7-3 奥内阿波座駅前ビル 702  
TEL: 06-6446-2100 (代表) FAX: 06-6446-2105  
URL: <http://www.medical-taskforce.com>  
E-mail: info@medical-taskforce.com

製品情報についてはこちらをご参照ください  
<http://www.adam-med.co.jp>

医療関係者の皆様へ

Pelvic Floor Supporter  
アダム医健の

骨盤底サポーター

大好評!



サポーターのみで

腔閉鎖術類似の効果が

得られます。

山梨大学医学部との共同研究成果に基づく当社開発品

## 対象

骨盤臓器脱（POP-Q 分類全てのステージの患者様にご使用いただけます）の症状を緩和します。特に、次のような患者様にとって利点があります。

- ペッサリーが合わない、または自己着脱指導が困難な方
- 高齢・合併症・再発などの理由で手術療法の適用が難しい方
- 頻尿傾向で着脱容易なものを希望する方
- 立ち座りなど日常の動作が多く、体の動きにフィットするものを希望する方
- 手術を望まない方、初期症状の方