

P-バンド ご使用上の注意

<以下の事項を必ず守って、適切な使用>

◆ 禁止事項

- 就寝時の P-バンドの使用
- 陰茎への過度の圧迫
- 長時間の使用（2～3 時間毎に面ファスナーを緩めて排尿することが必須です）

◆ 使用上の注意

- 陰茎の皮膚に痛みや腫れ又は圧迫による創傷などの異常がある場合には、本品を使用しない。
- 陰茎の血流に障害をきたさないよう、過度な締め付けを行わない。
- 排尿時に痛みや血尿などの症状が出た場合には直ちに使用を中止する。

◆ 不具合・有害事象

- 固定部の皮膚炎
- 過度な締め付けによる組織壊死

上記事項を遵守し、本品は自己の責任にて安全にご使用ください。

表記の禁止・注意事項を遵守せず不具合・有害事象の発生場合には当社は一切の責任を負いません。

株式会社メディカル・タスクフォース