


P-バンド NewLongType PB-01NL 装着手順


手順 1 装着前

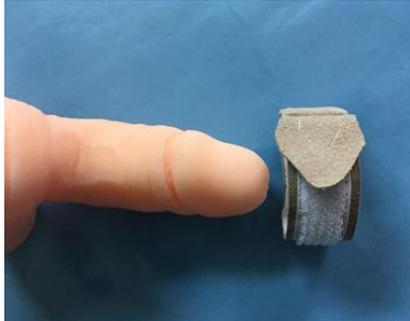

尿道圧迫部が内側になるようにPバンド先端を「環」に通して丸く輪を作ります。

※環が作りにくい時は、陰茎基部に直接巻き付けて、手順2以降に従って装着する。

手順 2 装着方法

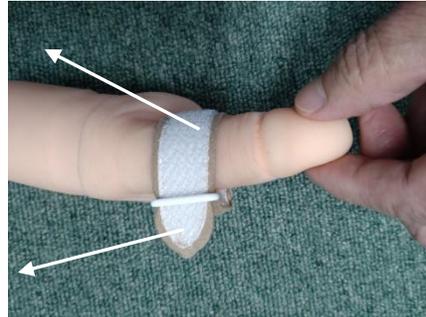

陰茎先端を引っ張りながら、丸く形成したP-バンドの輪を矢印の方向に引っ張って、陰茎基部に被せる。

手順 3 固定
(下部より見上げたイメージ図)



尿道圧迫部が尿道(赤い線)にあたるように陰茎基部にP-バンドを装着する。※ここがずれると尿漏れを起こします。

手順 4
固定の注意




過度に締め付けないように(腹圧が掛かると漏れるか漏れないか?)ぎりぎりのところで面ファスナーで固定する。

手順 5 排尿



排尿するときは面ファスナーを緩めるだけで良い。Pバンドを「環」より外さなくて良い。

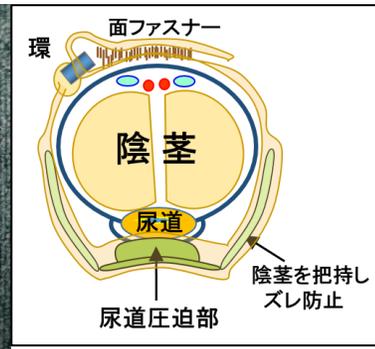

- ・全長: 150mm
- ・面ファスナー長: 115mm